

2011年3月

お客様各位

コヴィディエン ジャパン株式会社
レスピラトリー事業部**Nellcor™パルスオキシメータの内蔵バッテリーの稼働時間に関するお知らせ**

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より弊社製品に対しまして格別のご高配を賜り心よりお礼申し上げます。

このたびの計画停電に際し、Nellcor™パルスオキシメータを内蔵バッテリーにてお使いいただく場合の留意点を下記にお知らせいたします。

お使いいただいております機種により、充電時間および バッテリー稼働時間が異なります。またこれは新品時での時間でございますため、通常ご使用いただいている状況・保管状態・ご使用を開始されてからの時間等の条件により、充電時間・バッテリー稼働時間も異なりますので、ご注意くださいようお願い申し上げます。

謹白

記

Nellcor™パルスオキシメータ N-600x	充電時間：6時間 バッテリー稼働時間：8時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-560	充電時間：電源 Off 時 8時間 電源 On 時 12時間 バッテリー稼働時間：約7時間

なお、以下の機種につきましては、すでに販売を終了させていただいております。（内蔵バッテリー稼働時間は新品時のものです）

Nellcor™パルスオキシメータ N-595	2時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-550 plus	2時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-550B	8時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-550	1.5時間
Nellcor™パルスオキシメータ NPB-395	2時間
Nellcor™パルスオキシメータ NPB-295 /290	8時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-200	1.5時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-190	12時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-180	6時間
Nellcor™パルスオキシメータ N-3000	4時間

また、N-550 / N-395 / NPB-295 / N-290 / N-200 / N-190 / N-180 / N-3000 につきましては修理対象期間を終了させていただいており、残りの3機種につきましても本年中に修理を終了させていただく予定でございます。

以上